

SUPPORT JACKET

Bb PROIII

プロ仕様を追求したシリーズ最強モデル

メーカー希望小売価格 49,500円(税込)



サポートジャケットBb+PROIII機能

フォームナビ機能



独自開発のBb+(バックボーンプラス)が背骨と腰を理想的な姿勢へ誘導します。また、作業に伴う前かがみの姿勢を抑えることで背中や腰にかかる大きな負担を軽減します。

ランバーサポート機能



腰を安定、保護するための大きなベルトにより背骨と腹筋、背筋を包みます。これにより腹圧が保たれ、装着することにより作業時の腰や背骨への負担を軽減します。

マッスル機能



ひざから腰にかけて、脚の筋肉補助を目的としたマッスルベルトを装着しました。作業時における前屈姿勢や起き上がりの力を補助し、筋肉の負担を軽減します。

ボーン着脱式機構



バックボーンを取り外し、布(生地)部分を洗濯ネットに入れて洗濯できます。

Bbベルト



バックボーンが背中にジャストフィットし反力効果を最大限に引き出します。さらに2種類のベルトを同梱、自分好みに取り替え可能です。

サイドアップベルト



腹斜筋に沿ってベルトを締めることで、体幹が安定し、高いホールド感を実現します。また長さの調整や交換、取り外しも可能です。

スライド式チェストベルト



チェストベルトの高さ調整がスライドで簡単にできます。

Wロックひざベルト



すべりにくい生地と上下の増し締めベルト追加ですれにくく、しゃがみやすいデザインです。

通気性の良い生地



通気性の良い生地を採用しています。

■ Bb+(バックボーンプラス) 理論

背骨から骨盤にかけ、もう一つの体幹を生み出すために「第二の背骨Bb+(バックボーンプラス)」を独自開発。人の背骨と同じアーチと適度な可動性により椎間板の圧力増加を抑制し、負担の少ない姿勢角度をキープさせることで作業姿勢における理想的なカタチを創ります。



■ あらゆる作業姿勢に効果を発揮



■ 人間工学に基づく製品開発

数千社を超える現場のニーズ・意見を基に金沢大学と共同研究を実施。良い姿勢に導くことで、腰や身体への負担を軽減するサポートジャケットBb+独自機能を搭載した外骨格型アシストスーツを開発しました。

■ 幅広いシーンで活躍する外骨格型アシストスーツ

厚生労働省の調べ※では、日本人の約10分の1が腰痛の悩みを抱えていると言われており、全人口で考えると約1,200万人にのぼります。近年では、少子高齢化が進みシルバー世代の活躍も増えており、またテレワークによる腰痛の悩みを抱える人も増加傾向にあり、腰痛は社会問題となっています。現代のさまざまな作業シーンで腰の悩みと対峙する現場のプロから絶大な支持を得ている外骨格型アシストスーツです。

※厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」


■ サポートジャケットBb+(バックボーンプラス)の理論に基づき、「作業姿勢を良い姿勢に導く効果」について検証した結果

「サポートジャケットBb+」は、体幹の前傾角度を抑える作用を持ち、作業時に良い姿勢に導く効果が確認されました。また、コルセット機能と膝から腰の弾性生地により、大きなアシスト感を生み出していると考えられます。本製品は腰の負担を軽減する必要がある、さまざまな分野への効果が期待できると考えられます。


金沢大学 医薬保健研究領域 保健学系 リハビリテーション科学領域 准教授 米田 貢 先生(保健学)

■ 腰や身体をアシストする仕組み

腰の悩みの要因は、頻繁な持ち上げ動作や前かがみ姿勢と言われています。理想的な姿勢に導きながら、腹筋や背筋などの筋肉を正常に機能させ、身体にやさしく腰の負担を軽減させます。

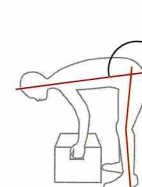

悪い姿勢

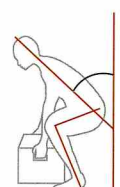

良い姿勢

幅広い作業シーンに
ベストな
アシストスーツを



ASSIST SUITS

“腰”の悩みは、世界中で社会問題になっています。そのため腰を守るアシストスーツが注目されるようになってきました。

近い将来、ヘルメットや安全靴のようにアシストスーツで腰を守る時代になるでしょう。

私たちユービーアールは、2010年よりアシストスーツ開発に取り組み、数千社のデモ実績により得た知識をもとに、導入を検討している皆様にわかりやすく選んでいただけるようご提案します。



使用上の注意事項

- ・本製品は身体的疾患を治療するものではありません。
- ・本製品が謳う機能や効果には個人差があります。
- ・下記に該当する方は着用をお控えください。
怪我や血行不良の疾患がある方
肩、胸、膝や装着部位に現在怪我のある方
傷、はれもの、湿疹など異常がある方
妊娠中または妊娠されている可能性のある方
その他疾患のある方など
- ・ご使用の際には正しく装着してください。
- ・使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・取扱説明書をお読みの上正しくご使用ください。
- ・製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
- ・経年劣化・ほつれ・破れ等が生じた場合はご使用をおやめください。



SUPPORT JACKET



外骨格の力。

【特許登録済】サポートジャケット®はユーピーアール株式会社の登録商標です。

upr ユーピーアール株式会社

住所：〒100-0011

東京都千代田区内幸町 1-3-2 内幸町東急ビル12F

TEL：(03) 3593-1727

E-mail：pas_info@upr-net.co.jp

URL：https://www.upr-net.co.jp



お問い合わせ

110-0015

東京都台東区東上野 2-10-13

フォーチュン福田ビル 1F

TEL:03-5688-4704 e-mail：s-konno@cofu.co.jp

株式会社フジコム

業務統括部 事業企画室

紺野 敏

2023年9月 発行